

Dans le cadre d'une utilisation multi-patient, le masque doit être retraité entre chaque patient selon des procédures de nettoyage, décontamination et stérilisation conformes à la norme ISO 17664 et validées par Air Liquide Medical Systems S.r.l. Ces procédures sont citées ci-dessous :

Décontamination	Détergent pH neutre	Aniosyme DD1 (dilué 0,5%)	✓
Désinfection	Thermique haute température	Selon EN ISO 15883-1 : 70°C - 100min, 75°C - 30min, 80°C - 10min, 90°C - 1min Exigences européennes 93°C - 10min	✓
	Chimique de haut niveau	Selon modalités prescrites par les fabricants des produits : Opaster, Opaster Plus, Aniosept Activ (dilué à 2% dans 5l H ₂ O), Anioxyde1000, Cidex OPA	✓
Stérilisation	Sterrad™	100S, NX, 100NX	✓
	Autoclave	121°C - 20 min	✓

Le masque Respireo Hospital F Non Vented Reusable a été validé pour ces procédures pour un maximum de 20 cycles. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au guide de réutilisation disponible sur le site web Air Liquide Medical Systems ou auprès de votre responsable commercial.

Compatibilité avec les ventilateurs

	Monnal T50	Monnal T60	Monnal T75	Extend	Autres ventilateurs à valve
<i>Compatibilité</i>	✓	✓	✓	✓	✓

Codes	Désignation	Taille
KM218800	Respireo Hospital F Non Vented Reusable (référence fabricant 472545*)	S
KM218900	Respireo Hospital F Non Vented Reusable (référence fabricant 472546*)	M
KM219000	Respireo Hospital F Non Vented Reusable (référence fabricant 472547*)	L
KM222400	Kit 10 hospital harnais (référence fabricant 472453)	



Respireo

Hospital F

Non Vented Reusable





Utilisation
multi-patients

Pour bénéficier d'une expertise complète
en ventilation non invasive



- Assure une ventilation non invasive efficace et confortable
- Garantit une utilisation en toute sécurité
- Permet une activité respectueuse de l'environnement
- Masque disponible en 3 tailles de bulles
- Gabarit attaché sur le packaging
- Packaging incluant masque, bulle et harnais assemblés

Conseils de mise en place

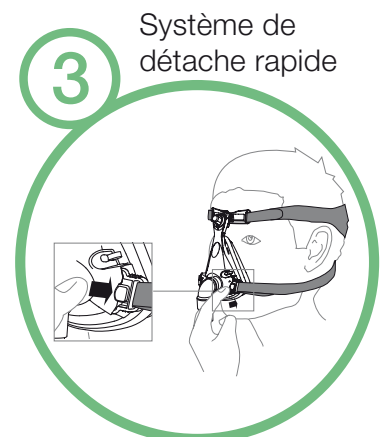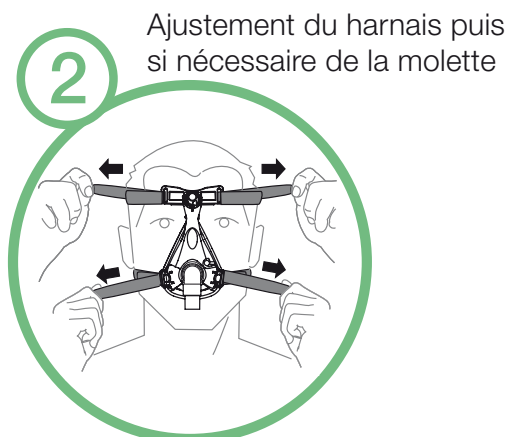

- Silicone biocompatible
- Ne contient pas de phtalates
- Ne contient pas de latex