

Respireo **SOFT**
Nasal

Respireo **SOFT** Nasal
Silent



Profitez mieux de votre sommeil

La clé de la réussite pour le traitement de vos patients.

La gamme Respireo™ SOFT Nasal facilitera la vie de vos patients en offrant une expérience utilisateur optimale.

Harnais UNIVEO™

- Assure une bonne stabilité périphérique et une répartition homogène des points d'appui

Bulle Respireo™ SOFT

- S'adapte naturellement au contour du nez pour assurer une étanchéité et un confort tout au long du sommeil

Crochets ergonomiques

- Permet une mise en place et un retrait rapide du harnais pour le patient

Bras latéraux flexibles

- Pour s'ajuster à la largeur du visage des patients

Cadre fin et flexible

- Assure un contact optimal de la bulle sur le visage du patient



Coude rotatif

- Facilite les mouvements du patient

Egalement disponible avec la fuite silencieuse Peace System®

- Ce port de ventilation assure un flux d'air plus doux et une diffusion plus efficace

Respireo SOFT Nasal
Silent

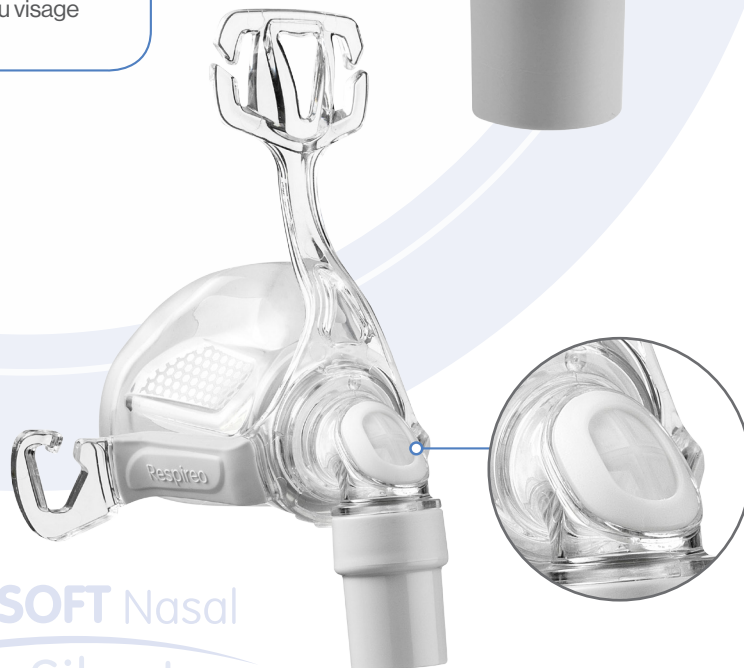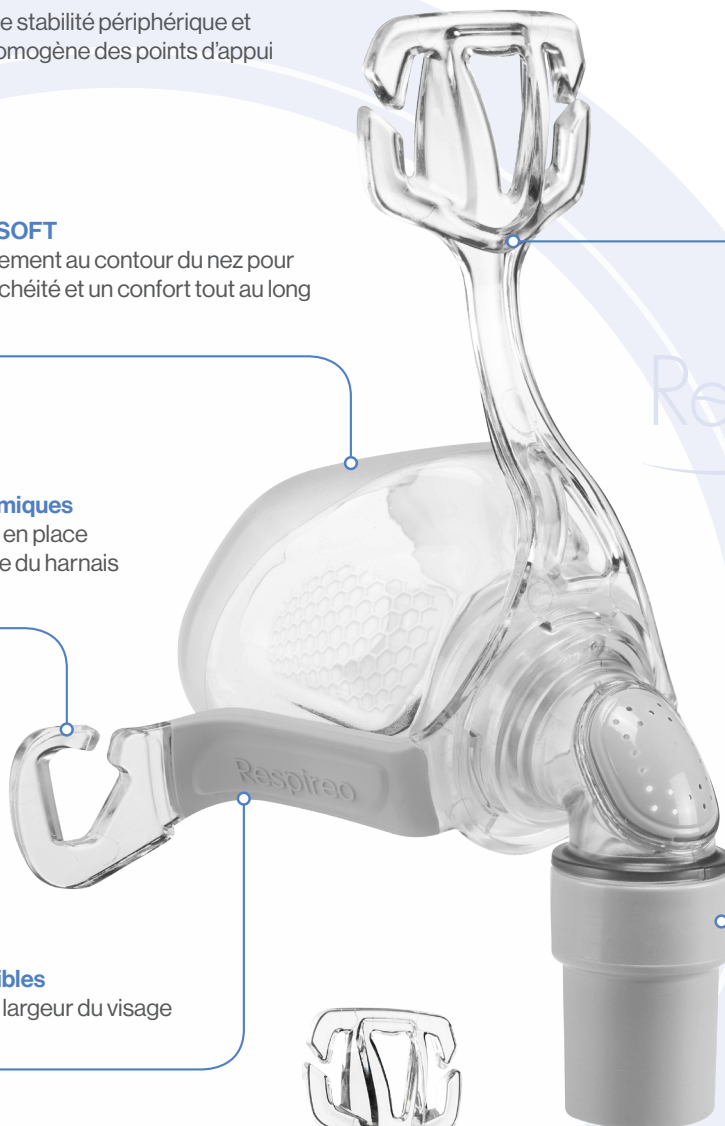

Respireo SOFT
Nasal

Respireo **SOFT** Nasal

Respireo **SOFT** Nasal Silent

Ses points forts

Confortable

- La bulle de technologie SOFT s'adapte au contour du nez afin de réduire la pression sur l'arête nasale qui est souvent une zone fragile


Simple d'utilisation

- Facile à ajuster, porter et nettoyer
- Conservation des réglages du harnais (retrait par les encoches de l'appui frontal et les crochets)

- Offre un sommeil paisible pour le patient et son partenaire grâce à la diffusion optimale du flux expiratoire


Diffusion silencieuse

Guide rapide d'utilisation

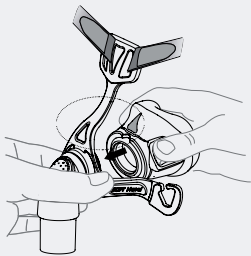


1

Alignez les triangles puis clipsez la bulle sur la coque.

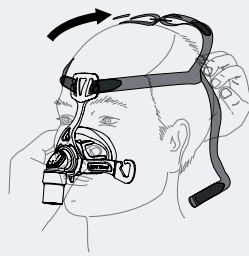


2

Positionnez le masque sur le nez en faisant passer le harnais derrière la tête avec l'autre main.

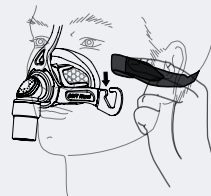

3

Fixez les branches inférieures du harnais aux crochets.

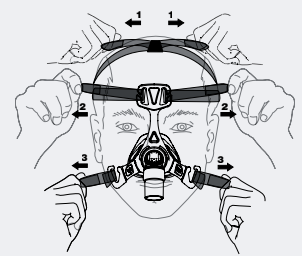

4

Ajustez les réglages du harnais de haut en bas (1, 2 puis 3).

Astuce : veillez à ne pas trop serrer le harnais.

Références

Respireo™ SOFT Nasal

Code produit	Description	Taille	Code Distributeur
472360	Respireo™ SOFT Nasal	M	KM227500
472361	Respireo™ SOFT Nasal	L	KM227600

Pièces détachées :

472471	Harnais UNIVEO™	Taille Unique	KM227700
472470	Bulle Respireo™ SOFT Nasal	M	KM227800
472473	Bulle Respireo™ SOFT Nasal	L	KM228700
472474	Coude Sans Fuite Nasal*	-	KM228800
472483	Raccord pivotant gris**	-	KM229130

Respireo™ SOFT Nasal Silent

Code produit	Description	Taille	Code Distributeur
472365	Respireo™ SOFT Nasal Silent	M	KM229106
472366	Respireo™ SOFT Nasal Silent	L	KM229107

Pièces détachées :

472471	Harnais UNIVEO™	Taille Unique	KM227700
472470	Bulle Respireo™ SOFT Nasal	M	KM227800
472473	Bulle Respireo™ SOFT Nasal	L	KM228700
472474	Coude Sans Fuite Nasal*	-	KM228800
472483	Raccord pivotant gris**	-	KM229130

Scannez ici
pour plus d'informations



Fabriqué par

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY
Tel. +39 030.201.59.11
Fax +39 030.209.83.29

Contact distributeur

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
France

fr.medicaldevice.airliquide.com

Respireo™ SOFT Nasal est un masque nasal réutilisable avec des fuites d'expiration calibrées (Vented) destiné à être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier pour plusieurs patients adultes (pesant plus de 30 kg) qui ont reçu une thérapie de ventilation non invasive à pression positive (VNIIPP), par exemple une thérapie des voies aériennes à pression positive continue (PPC) ou Bilevel (BiPAP).

Respireo™ SOFT Nasal Silent est un masque nasal réutilisable avec des fuites d'expiration calibrées (Vented) destiné à être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier pour plusieurs patients adultes (pesant plus de 30 kg) qui ont reçu une thérapie de ventilation non invasive à pression positive (VNIIPP), par exemple une thérapie des voies aériennes à pression positive continue (PPC) ou Bilevel (BiPAP).

Dispositifs médicaux de classe IIa CE 0051 - Remboursés par l'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site amel.fr - Lire attentivement le manuel d'utilisation. Date de mise à jour : Juin 2023

Air Liquide Medical Systems, Antony 348 921735 R.C.S Nanterre.

* Dispositif médical qui modifie l'usage prévu du masque en le remplaçant par le suivant : Respireo™ SOFT Nasal et Respireo™ SOFT Nasal Silent avec le Coude Sans Fuite Nasal sont des masques nasaux réutilisables sans orifices d'expiration calibrés destinés à être utilisés à domicile ou en milieu hospitalier par plusieurs patients adultes (pesant plus de 30 kg) sous ventilation à pression positive non invasive (VPPN).

** Cette pièce détachée est uniquement destinée à la version Vented.